

## CASO CLINICO

---

Restauri adesivi  
diretti negli anteriori



D.ssa Elisabetta  
**Pastorini**

Paziente di 50 anni, si rivolge al mio studio per migliorare il suo sorriso. Presenta un vecchio restauro in composito sul 21 e usura del margine incisale dell'11. Dopo aver isolato il campo operatorio con diga di gomma, si procede alla rimozione del vecchio restauro. Dopo mordenzatura con acido ortofosforico e adesione si effettua la ricostruzione del margine incisale dell'11 e la stratificazione del 21. Per la ricostruzione delle pareti interprossimale viene utilizzata una matrice in acetato sagomata ad altezza variabile che viene fatta scorrere fino a coincidere perfettamente con l'altezza del dente. Si completa la stratificazione e si esegue rifinitura e lucidatura finale.

---

**Garrison**  
Dental Solutions

150 DeWitt Lane  
Spring Lake, MI USA  
49456



contactme@garrisondental.com  
[www.garrisondental.com/it](http://www.garrisondental.com/it)



Fig. 1 Immagine frontale iniziale del sorriso del paziente



Fig. 2 immagine iniziale dei denti anteriori superiori



Fig. 3 Isolamento con diga di gomma



Fig. 4 rimozione del vecchio restauro



Fig. 5 Ricostruzione parete palatale



Fig. 6 Posizionamento Blue Vieux Varistrip sagomata ad altezza variabile



Fig. 7 Foto finale dopo lucidatura e brillantatura



**Garrison**  
Dental Solutions

contactme@garrisdental.com  
[www.garrisdental.com/it](http://www.garrisdental.com/it)