

## CASO CLINICO

---

Restauraciones directas  
en el sector posterior  
con el sistema Strata-G™



Dr Victor  
**Henarejos**

La restauración de cavidades interproximales clases II con composite directo requiere de un sistema polivalente de matrices, anillos y cuñas, con tal de conseguir un adecuado punto de contacto y un correcto perfil de emergencia. El novedoso sistema STRATA-G™ de Garrison Dental Solutions se presenta como una solución extremadamente versátil para la obtención de restauraciones anatómicas en el sector posterior.



Figura 1. Situación inicial, tras el aislamiento del campo operatorio con dique de goma, para el tratamiento de las lesiones cariosas situadas en distal y mesial del segundo premolar superior derecho, y en mesial del primer molar superior derecho.



Figura 2. Retirada del tejido carioso y preparación final de las cavidades, arenado con óxido de aluminio de 29 µm.



Figura 3. Colocación y adaptación de las nuevas matrices seccionales de la serie SG junto con el anillo de presión naranja del sistema Strata-G™, ideal para cavidades estándar.



Figura 4. Restauración final pulida del primer molar superior derecho tras la retirada del anillo de presión, la cuña, y la matriz seccional. Nótese que se colocaron inicialmente ambas matrices para la correcta distribución de espacios, pero se restauran de manera independiente para conseguir un mejor acabado y un punto de contacto más firme.



Figura 5. Vista lateral tras la colocación y adaptación de las matrices seccionales de premolares de la serie SG y las cuñas del sistema Strata-G™.



Figura 6. Colocación y adaptación de diferentes anillos en el mismo diente. Anillo de presión naranja en distal y anillo de presión azul del sistema Strata-G™.



Figura 7. Vista oclusal de las restauraciones tras realizar el pulido y abrillantado final.



Figura 8. Vista lateral de las restauraciones tras realizar el pulido y abrillantado final.



Figura 9. Vista vestibular de las restauraciones, donde se visualizan los puntos de contacto anatómicos creados por el sistema Strata-G™.

**Garrison**  
Dental Solutions

contactme@garrisondental.com  
[www.garrisondental.com/es](http://www.garrisondental.com/es)