

Caso Clinico

3.1, 4.1 Correzione di forma

con Garrison Fusion™ Anterior Matrix System

Katarzyna Zarebska, DDS, MSc

01



Fig 1. Il paziente si sottopone alla mia attenzione con la richiesta di correggere la forma e l'affollamento degli incisivi centrali inferiori. Il paziente rifiuta la terapia ortodontica a causa dei lunghi tempi clinici, si decide di eseguire dei restauri diretti in composito minimamente invasivi.

02



03


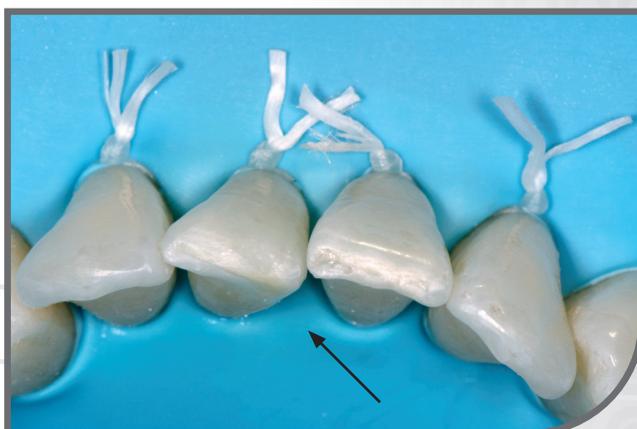


Fig 2 and 3. Ameloplastica della superficie mesiale e margine incisale dell'elemento 3.1

04

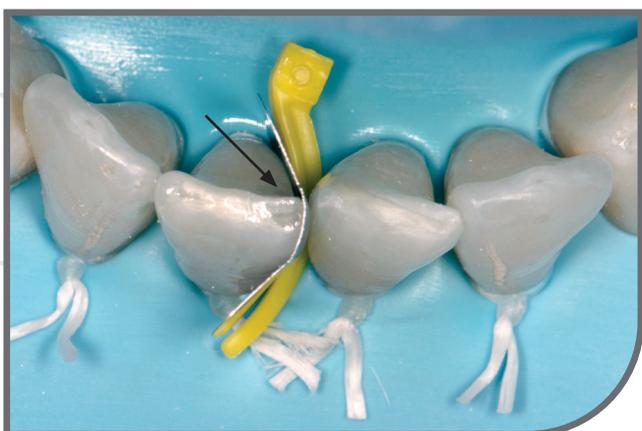

05



Fig 4 and 5. Dopo l'ameloplastica della superficie interprossimale vengono selezionate la matrice Garrison Fusion™ Anterior Matrix System ed il corrispettivo cuneo. La superficie linguale viene allineata aumentando il volume mesiale dell'elemento 4.1.

06




07



Fig 6 and 7. Il profilo del cuneo permette una perfetta aderenza della matrice all'area cervicale e coadiuva la realizzazione della morfologia simmetrica di entrambi gli incisivi centrali.

08

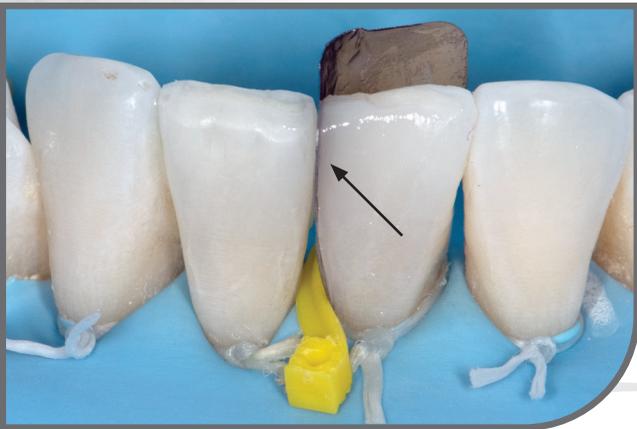

09



Fig 8 and 9. Successivamente, utilizzando lo stesso sistema di matrici, viene allineata anche la superficie vestibolare di entrambi gli incisivi centrali, aumentando il volume della superficie mesiale dell'elemento 31.

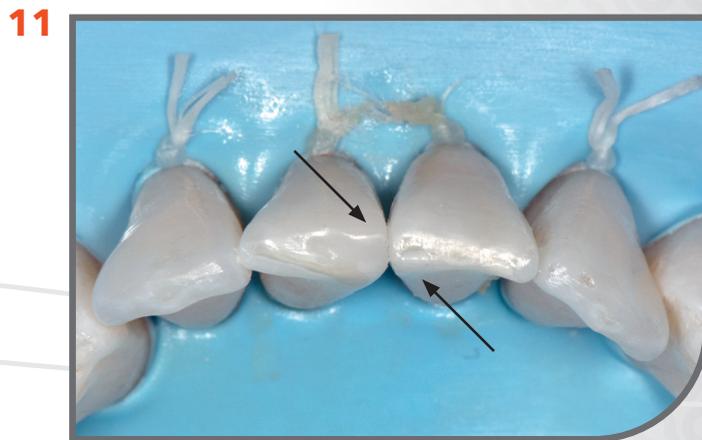


Fig 10, 11 and 12. Finitura e lucidatura



Fig 13 and 14. Risultato finale

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456
Toll free 888.437.0032

European office:
Carlstr. 50
52531 Uebach-Palenberg
Germany
Tel. +49 (0) 2451 971 409