

Caso Clinico

La gestione simultanea di differenti cavita' in un solo appuntamento.

Dott. Carlo Arcara



Nel caso in questione sono state trattate diverse cavità cliniche tutte in un solo tempo permettendo la gestione corretta di tutti i punti di contatto e la gestione corretta di estetica e funzione. Il tutto con un'ottimizzazione di tempi e costi.

Situazione iniziale: dall'esame clinico e radiografico si riscontrano diverse carie interprossimali che porterebbero alla formazione di cavità di seconde classi. Visto e considerato la compromissione di gran parte degli spazi interdentali, risulta strategico per l'economia dello studio l'andare a trattare in un'unica seduta tutte le carie interprossimali. Il riuscire a trattare in unica seduta obiettivamente richiede una seduta più lunga in ordine di tempo, ma sicuramente minor stress per il paziente ed anche un importante risparmio di tempo e materiale rispetto al trattamento per singolo dente.

Situazione finale: Grazie alla gestione delle pareti interprossimali con anelli dedicati e matrici metalliche dedicate, ci consente di riabilitare le cavità interdentali con predicibilità e con una importante semplicità operativa. quindi in unica seduta si ottiene la totalità della gestione di tutti i punti di contatto di un settore diatorico con sicurezza e predicibilità.



Fig 1 Quadrante che presenta restauri incongrui ed infiltrati e carie interprossimali.



Fig 2 Isolamento del campo operatorio.



Fig 3 Rimozione dei restauri e della carie.



Fig 4 Trattamento contestuale delle seconde classi



Fig 5 Trasformazione delle cavità da seconda a prima classe.



Fig 6 Finalizzazione dei restauri.



Fig 7 Post occlusione e lucidatura.

Il caso viene ultimato con la fase di polish e di controllo dei punti di contatto.

Garrison
Dental Solutions

European office:
Carlstr. 50
52531 Uebach-Palenberg
Germany
Tel. +49 (0) 2451 971 409