

PRZYPADEK KLINICZNY

System formówek sekcyjnych Garrison pozwolił mi na odbudowę prawidłowych punktów styecznych.



Dr Monika
Szumańczyk
„Odbudowa ubytku
klasy II”

Pierścienie dobrze przylegają do zębów, a matryce są prawidłowo wyprofilowane, co bardzo ułatwia pracę. Po zdjęciu matrycy ewentualny nadmiar materiału jest łatwy do usunięcia.




1 Ząb 35 z ubytkiem kl. II mezialnie, izolacja zęba przy pomocy koferdamu




2 Całkowite opracowanie ubytku



3 Założenie matrycy i niebieskiego klina, widoczna nieszczelność

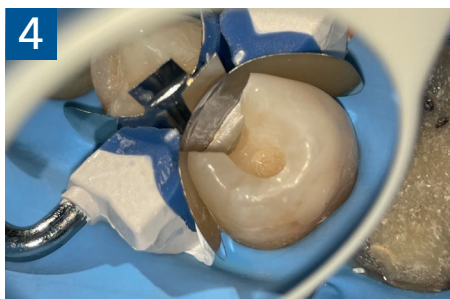

4 Wymiana klina na pomarańczowy i założenie pierścienia

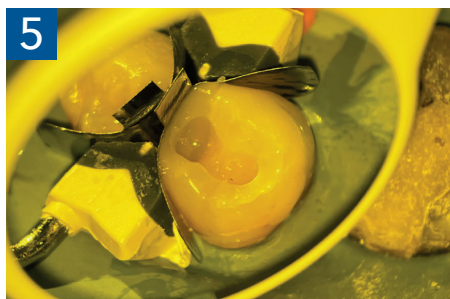

5 Odbudowa ściany mezialnej



6 Odbudowa ubytku i zdjęcie matrycy



7 Usunięcie nadmiarów materiału



8 Dostosowanie w zgryzie i polerowanie

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456



contactme@garrisondental.com
www.garrisondental.com/pl