

Clinical Case

IPR

Robert Białach



FitStrip™ to narzędzie, które przyda się każdej praktyce ortodontycznej. Dzięki niemu możemy w precyzyjny sposób wykonać redukcję szkliwa podczas leczenia ortodontycznego. Dzięki wygodnej rękojeści możemy wykonać IPR zarówno w odcinku przednim jak i bocznym, w zestawie są dołączone dwie, co zwiększa efektywność zabiegu ponieważ asysta czeka z przygotowanym następnym rozmiarem paseczka ściernego. Dużą zaletą systemu jest obecność zarówno dwustronnych jak i jednostronnych nasypów oraz możliwości zagięcia paseczków w celu lepszego konturowania powierzchni stycznej. Dołączony do zestawu klucz IPR w łatwy sposób zapewni kontrolę nad ilością uzyskanego miejsca za pomocą zestawu FitStrip™.

01



Fig 1. Stan przed leczeniem ortodontycznym – przy dużym stłoczeniu zębów nie zalecane jest wykonywanie IPR od razu z powodu utrudnionego dostępu do przestrzeni stykowej zębów.

02



Fig 2. Stan w trakcie leczenia ortodontycznego aparatem Invisalign - zęby wstępnie odrotowane.

03



Fig 3. Redukcja przestrzeni międzyzębowej za pomocą systemu FitStrip™.

04



Fig 4. Do redukcji przestrzeni międzyzębowej zrotowanych zębów, paseczki można napiąć i wygiąć w łuk by precyzyjnie wykonać IPR.

05



Fig 5. W razie potrzeby redukcji tylko jednej przestrzeni, można wykorzystać paseczki jednostronne.

06



Fig 6. Po zakończonej redukcji ocena za pomocą klucza IPR.

07



Fig 7. Ostateczne polerowanie za pomocą paseczków polerujących.

08



Fig 8. Stan po wykonaniu redukcji przestrzeni międzyzębowej za pomocą FitStrip™ – stworzono miejsce do dalszej derotacji siekaczy.

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456
Toll free 888.437.0032

European office:
Carlstr. 50
52531 Uebach-Palenberg
Germany
Tel. +49 (0) 2451 971 409