

# CASO CLINICO

Restauri adesivi diretti  
nel settore anteriore



Dr Alessandro  
**Conti**

Paziente femmina di 47 anni, si rivolge al nostro studio con la richiesta di un miglioramento estetico del settore anteriore.

Non presenta patologie di natura sistemica.

Dopo l'esame obiettivo riscontriamo esserci due vecchi restauri in composito sugli elementi 1.1 e 2.1 con margini incongrui e con evidenti segni di usura.

Si decide, in accordo con la paziente, di eseguire 2 nuovi restauri diretti in composito con maggiore estensione vestibolare per implementare i volumi e quindi migliorarne estetica e morfologia.

Dopo l'anestesia e il posizionamento della diga di gomma, si procede con la rimozione dei vecchi restauri con frese diamantate e con la detersione cavitaria con frese al carburo di tungsteno.

Si termina la rifinitura cavitaria con frese diamantate a grana fine a livello dei margini di smalto periferici.

Dopo l'adesione e l'ibridizzazione dentinale si procede con la stratificazione del composito, partendo dalla cresta marginale che viene stratificata con una massa smalto e con l'uso di matrici in acetato precurvate che permettono di mantenere una forma adeguata della parete interprossimale.

Si termina la stratificazione con masse dentinali, stains e smalto vestibolare.

Molto importanti in questi restauri la fase di determinazione delle linee di transizione, della tessitura superficiale e della lucidatura finale.



Immagine iniziale in visione frontale



Isolamento con la diga di gomma



Mordenzatura di smalto e dentina



Lavaggio del mordenzante



Inserzione della matrice in acetato precurvata dopo la realizzazione dello scudo palatale in smalto.



Restauri ultimati sotto diga



Foto Frontale finale ad un controllo a distanza di un mese

**Garrison**  
Dental Solutions

150 DeWitt Lane  
Spring Lake, MI USA  
49456



contactme@garrisondental.com  
[www.garrisondental.com/it](http://www.garrisondental.com/it)