

CASO CLINICO

La semplificazione dell'accesso agli spazi interprossimali per lo stripping con FitStrip™



Dr. Tommaso
Weinstein,
DDS, PhD

La riduzione interprossimale o stripping è una procedura essenziale in molte terapie ortodontiche. Nella terapia con allineatori trasparenti viene programmata accuratamente su software ed è importante che venga poi traspota clinicamente nella maniera corretta. La moderna odontoiatria prevede un approccio alle terapie poco invasivo in cui il paziente non percepisca dolore o stress durante le procedure. FitStrip™ presenta una caratteristica striscia seghettata che permette di aprire i punti di contatto con grande facilità per l'operatore e nessun fastidio per il paziente. Questo farà sì che i passaggi con i FitStrip™ successivi saranno semplificati e permetteranno di raggiungere la quota di stripping programmata. Viene presentato un caso risolto con allineatori trasparenti, sbiancamento e otturazioni che è iniziato proprio con l'utilizzo di FitStrip™.

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456



contactme@garrisondental.com
www.garrisondental.com/it



Figura 1a-e: situazione iniziale: è stato deciso di risolvere l'affollamento superiore e inferiore in area estetica con la metodica di allineatori Invisalign Go™ (Align Technology Inc., Tempe, AZ, USA)

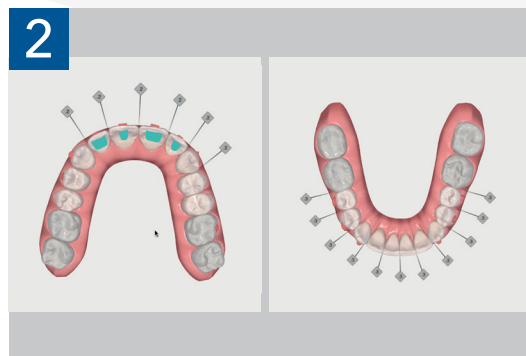


Figura 2a e b: pianificazione ClinCheck© (Align Technology Inc., Tempe, AZ, USA) in cui è evidente la significativa quota di stripping richiesta.



Figura 3: l'utilizzo della striscia seghettata FitStrip™ permette una semplice apertura dei punti di contatto, semplificando le procedure cliniche e aumentando il comfort per il paziente.



Figura 4a-e: allineamento completato



Figura 5a-c: sbiancamento alla poltrona (D.ssa Francesca Gammino)



Figura 6a-b: ricostruzione dei margini incisali